


INSTALLATIONS SPORTIVES

MAINTENANCE DÉFIBRILLATEUR

L'exploitant de ce dispositif doit respecter 3 obligations au sens de l'article R. 5211-5 du code de la santé publique.

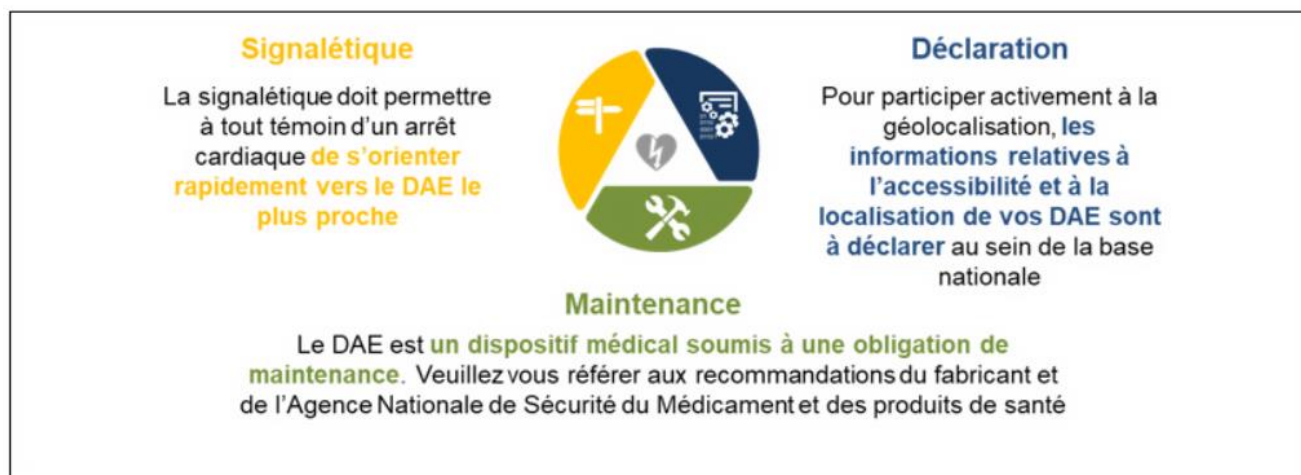

Maintenir son DAE n'équivaut pas uniquement à la supervision de son dispositif mais également à la mise à jour régulière de ses composants, et notamment des consommables (batterie, électrodes) et de son logiciel, conformément aux recommandations du fabricant.

L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament émet des [recommandations relatives à la maintenance des dispositifs médicaux](#)

II. LES POINTS DE CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DU DEFIBRILLATEUR

Le contrôle d'un défibrillateur doit comprendre le contrôle des éléments suivants :

- Fonctionnement du témoin visuel d'état de marche.
- Intégrité du DAE et présence des accessoires.
- Vérification des électrodes et de leur emballage. (En changer si nécessaire).
- Vérification de la batterie.
- Vérification si des mises à jour doivent être effectuées.
- Récupération et remise en état des données médicales (5ECG) du patient après une utilisation de l'appareil.

Mettre un défibrillateur à disposition du grand public, c'est s'engager à assurer une maintenance régulière pour que ce dispositif soit opérationnel à tout moment et sauve des vies.

Source : Santé.gouv.fr – article MAJ le 25-02-25